

eneso
sense

**ESPACIOS
MULTISENSORIALES**



Sillón vibroacústico reclinable motorizado

Instrucciones de instalación y uso
Ref.: 003016

ES 1.5

www.eneso.es

Antes de utilizar el sillón vibroacústico lee estas instrucciones detalladamente y consérvalas para futuras consultas.

Especificaciones

Modelo	001249
Alimentación eléctrica	220V AC
Consumo de potencia máx.	100W
Dimensiones (largo x ancho x alto)	65 x 80 x 100 cm

Instrucciones importantes de seguridad

- No utilices el producto sin haber leído las instrucciones de instalación y mantenimiento.
- No conectes audio amplificado al sillón vibroacústico, utiliza solo audio de línea. Si tienes dudas ponte en contacto con el servicio técnico de Eneso.
- Asegúrate de que el sillón se utiliza siempre bajo la supervisión de un adulto que haya sido instruido sobre el uso adecuado del mismo.
- No taladres ni modifiques el sillón vibroacústico de forma alguna.
- No lo utilices ni lo almacenes al aire libre.

Sillón vibroacústico reclinable motorizado

Sillón vibroacústica para sala multisensorial que facilita las transiciones y se ajusta a la postura necesaria

Este cómodo sillón permite trabajar interactuar con la música o la voz en forma de vibración. Aunque es apto para todas las edades, es especialmente efectiva en adultos y mayores. Es reclinable con un cómodo sistema motorizado que se ajusta hasta alcanzar la postura ideal. Los brazos se desmontan para facilitar la transferencia.

Su amplificador integrado transmite la música, voz o efectos de sonido que se utilice como entrada a toda la estructura en forma de vibración, y la potencia es regulable. Puedes utilizar cualquier fuente de audio, como un teléfono móvil, reproductor MP3, ordenador o equipo de música, a través de audio de línea o Bluetooth.

Instalación

- Sitúa el sillón vibroacústico en su ubicación definitiva de la sala.
- Conéctalo a una toma de corriente eléctrica.
- Conecta una fuente de audio a las entradas de audio de línea RCA (a) o por Bluetooth.

IMPORTANTE: Si usas RCA, utiliza únicamente señales de **audio de línea** sin amplificar, como las de un teléfono móvil, un reproductor MP3 o las salidas de línea de un equipo de música. Utilizar señales amplificadas, como la salida de altavoces de un equipo de música, **puede dañar el sillón vibroacústico.**

Conexión a un reproductor MP3 o teléfono móvil


- Utiliza un cable adaptador de jack de 3.5mm (**mini jack**) a RCA para conectar la piscina a tu reproductor, o vincula el dispositivo con la conexión Bluetooth del sillón vibroacústico.

Conexión a un reproductor MP3 o teléfono móvil

- Busca en tu dispositivo (smartphone, ordenador, etc.) la red bluetooth del sillón y dale a establecer conexión. La próxima vez que se use ya estará conectado a ese dispositivo.

Conexión a un equipo de música

- Utiliza un cable RCA a RCA para conectar el sillón a la salida de línea de tu equipo de música. Habitualmente, estas salidas vienen etiquetadas como LINE OUT.

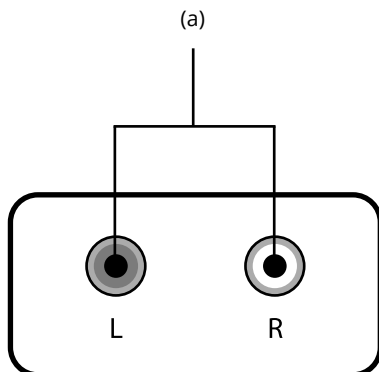

Funcionamiento


El sillón vibroacústico amplifica la señal de audio de entrada y la transmite en forma de vibración a toda la estructura. Puedes utilizarla con música, efectos de sonido o la propia voz (si utilizas un micrófono conectado a un equipo de música).

Activar y desactivar la vibración

- Para activar la vibración del sillón vibroacústico, enciende el sistema vibroacústico activando el conmutador (b). Es recomendable que antes bajes la potencia (e) al mínimo para asegurarte de que el nivel de vibración es agradable para el usuario.
- Para apagarla, desactiva el conmutador (b).

Ajustar la vibración

- Para regular el nivel de vibración gira la rueda (e). Ten en cuenta que el volumen de la entrada de audio también influirá en la potencia de la vibración, así que también puedes controlarlo desde tu reproductor, teléfono móvil o equipo de música.

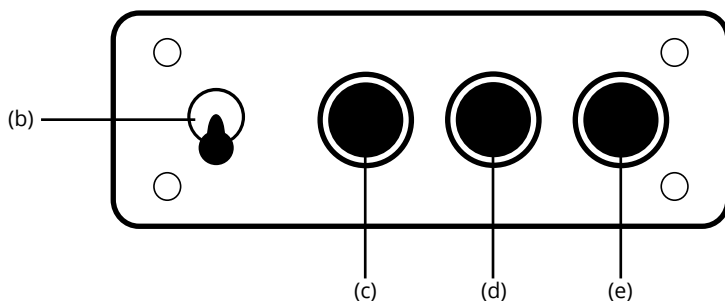

- Puedes controlar cuánto se potencian las frecuencias altas (agudos) de la señal de entrada con la rueda (c), y las frecuencias bajas (graves) con la rueda (d). En general, potenciar las frecuencias bajas hará que el sillón vibre más y la señal de entrada sea menos audible, y viceversa.

Reclinado y brazos desmontables

El sillón lleva incorporado un sistema de reclinado motorizado con un mando de dos botones que te permite regular la inclinación al gusto del usuario. Solo tiene que mantener pulsado subir o bajar hasta alcanzar la inclinación adecuada. Cuando termine de usarlo coloque el sillón en su posición erguida.



Para facilitar las transiciones hacia y desde, los dos brazos del sillón pueden demontarse. Para ello tire hacia arriba de ellos extrayendo el o los brazos deseados.

Resolución de problemas

El sillón no vibra

- Comprueba que el sillón esté correctamente enchufado a la alimentación eléctrica.
- Comprueba que el sistema de vibración del sillón está encendido.
- Comprueba que haya una fuente de audio conectada y que el volumen de la fuente de audio no esté al mínimo.
- Comprueba que el nivel de vibración no esté al mínimo.
- Comprueba que la fuente de audio esté reproduciendo música o algún sonido.

Si tienes cualquier otro problema envía un correo a soporte@eneso.es con el mayor nivel de detalle posible y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para solucionarlo.

Acerca de Sense


Con la tecnología Eneso Sense puedes crear espacios de estimulación sensorial dinámicos, configurables e interactivos. Combina las causas y efectos que más te gusten y consigue la experiencia sensorial que desees. Además, todos los elementos Sense son compatibles y pueden interactuar entre sí, lo que te permite ampliar tu sala en cualquier momento.

Entra en **www.eneso.es/sensorial** para conocer todo el catálogo de productos Sense.



Si necesitas desprenderte de este producto no lo deposites en el contenedor de residuos domésticos.



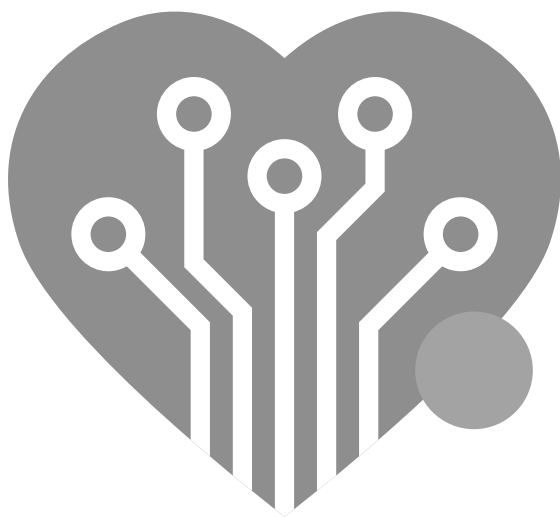

eneso.es



info@eneso.es



[\(+34\) 951 13 71 45](tel:+34951137145)



www.eneso.es



eneso

Eneso · Tecnología para un mundo más accesible