

eneso
sense

ESPACIOS
MULTISENSORIALES



Sillón vibroacústico

Instrucciones de instalación y uso
Ref.: 001249

ES

www.eneso.es

Antes de utilizar el sillón vibroacústico lee estas instrucciones detalladamente y consérvalas para futuras consultas.

Especificaciones

Modelo	001249
Alimentación eléctrica	220V AC
Consumo de potencia máx.	100W
Dimensiones (largo x ancho x alto)	70cm x 72cm x 84cm

Instrucciones importantes de seguridad

- No utilices el producto sin haber leído las instrucciones de instalación y mantenimiento.
- No conectes audio amplificado al sillón vibroacústico, utiliza solo audio de línea. Si tienes dudas ponte en contacto con el servicio técnico de Eneso.
- Asegúrate de que el sillón se utiliza siempre bajo la supervisión de un adulto que haya sido instruido sobre el uso adecuado del mismo.
- No taladres ni modifiques el sillón vibroacústico de forma alguna.
- No lo utilices ni lo almacenes al aire libre.

Sillón vibroacústico

El **sillón vibroacústico** es un gran recurso para la estimulación somática profunda. Con él el usuario puede percibir las vibraciones de la música, efectos de sonido o incluso su propia voz.

Para transmitir la música a través de él no necesitas ningún amplificador adicional, tan solo conecta tu móvil o reproductor de MP3 al sillón a través de un cable jack estándar. También lo puedes conectar a un equipo de música a través de un cable RCA.

Instalación

- Sitúa el sillón vibroacústico en su ubicación definitiva de la sala.
- Conéctalo a una toma de corriente eléctrica.
- Conecta una fuente de audio a las entradas de audio de línea RCA (a).


IMPORTANTE: utiliza únicamente señales de **audio de línea** sin amplificar, como las de un teléfono móvil, un reproductor MP3 o las salidas de línea de un equipo de música. Utilizar señales amplificadas, como la salida de altavoces de un equipo de música, **puede dañar el sillón vibroacústico**.

Conexión a un reproductor MP3 o teléfono móvil

- Utiliza un cable adaptador de jack de 3.5mm (*mini jack*) a RCA para conectar el sillón a tu reproductor.

Conexión a un equipo de música

- Utiliza un cable RCA a RCA para conectar el sillón a la salida de línea de tu equipo de música. Habitualmente, estas salidas vienen etiquetadas como LINE OUT.

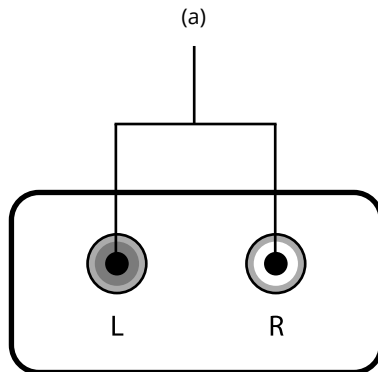

Funcionamiento

El sillón vibroacústico amplifica la señal de audio de entrada y la transmite en forma de vibración a toda la estructura. Puedes utilizarlo con música, efectos de sonido o la propia voz (si utilizas un micrófono conectado a un equipo de música).

Activar y desactivar la vibración

- Para activar la vibración del sillón, enciende el sistema de vibración pulsando el botón (b). Es recomendable que antes bajes la potencia al mínimo para asegurarte de que el nivel de vibración es agradable para el usuario.
- Para apagarla, vuelve a pulsar el botón.

Ajustar la vibración

- Para regular el nivel de vibración, gira la rueda (c). Ten en cuenta que el volumen de la entrada de audio también influirá en la potencia de la vibración, así que también puedes controlarlo desde tu reproductor, teléfono móvil o equipo de música.



Resolución de problemas

El sillón no vibra

- Comprueba que el sillón esté correctamente enchufado a la alimentación eléctrica.
- Comprueba que el sistema de vibración del sillón está encendido.
- Comprueba que haya una fuente de audio conectada y que el volumen de la fuente de audio no esté al mínimo.
- Comprueba que el nivel de vibración no esté al mínimo.
- Comprueba que la fuente de audio esté reproduciendo música o algún sonido.

Si tienes cualquier otro problema envía un correo a soporte@eneso.es con el mayor nivel de detalle posible y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para solucionarlo.

Acerca de Sense


Con la tecnología Eneso Sense puedes crear espacios de estimulación sensorial dinámicos, configurables e interactivos. Combina las causas y efectos que más te gusten y consigue la experiencia sensorial que desees. Además, todos los elementos Sense son compatibles y pueden interactuar entre sí, lo que te permite ampliar tu sala en cualquier momento.

Entra en www.eneso.es/sensorial para conocer todo el catálogo de productos Sense.



Si necesitas desprenderte de este producto no lo deposites en el contenedor de residuos domésticos.



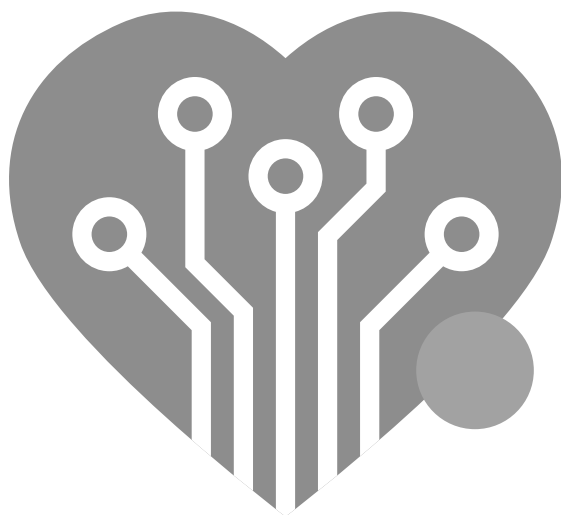

eneso.es

✉ info@eneso.es

📱 (+34) 951 13 71 45

🌐 www.eneso.es



Eneso · Tecnología para un mundo más accesible